



Bêtagène

INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS



PAS NOURRITURE ET EAU

- L'animal ne doit **pas manger ni boire 30-60 min** avant le prélèvement.
 - Les chiots/chatons doivent être isolés de la mère, de leurs frères/soeurs et de jouet partagé 60 min avant le prélèvement.
-

UTILISATION DES BROSSETTES POUR PRÉLEVER CELLULES À L'INTÉRIEUR DES JOUES



- Manipuler la brosse avec le **manche** (ne pas toucher aux soies avec vos doigts).
- Placer les soies de la brosse à l'intérieur de la **joue** de l'animal.
- Appuyer légèrement sur l'extérieur de la joue et **frotter** en faisant tourner la brosse d'avant en arrière pendant **15-30 sec**. *La présence d'un peu de sang sur la brosse n'est pas dramatique.*
- **Assécher** la brosse en l'agitant à l'air pendant 10-20 sec et remettre dans l'emballage. Répétez avec la 2e brosse.
- Inscrire le **nom de l'animal** sur l'emballage et sceller avec du ruban adhésif.
- Si vous prélevez plusieurs animaux, vous **lavez les mains** entre chaque individu



- La présence de contaminants sur les brosettes est nuisible pour les réactions. Les **brossettes souillées** par des particules, comme la terre et la saleté, **seront refusées** pour les analyses sans possibilité de remboursement.
-

ADRESSE



- Placer les échantillons et une copie de la facture dans une enveloppe adressée à:

Isabelle Gilbert
Pav. Comtois, Dép. Sciences animales
2425 rue de L'Agriculture, Local 4223
Université Laval
Québec, QC,
G1V 0A6