

## Bêtagène

### INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS



#### PAS NOURRITURE ET EAU

- L'animal ne doit **pas manger ni boire 30-60 min** avant le prélèvement.
- Les chiots/chatons doivent être isolés de la mère, de leurs frères/soeurs et de jouet partagé 60 min avant le prélèvement.

# UTILISATION DES BROSSETTES INTERDENTAIRES POUR PRÉLEVER CELLULES À L'INTÉRIEUR DES JOUES



- Utiliser 2 brossettes par animal (marque GUM, sans saveur, voir image)
- Manipuler la brossette avec le **manche** (ne pas toucher aux soies avec vos doigts).
- Placer les soies de la brosse à l'intérieur de la joue de l'animal.
- Appuyer légèrement sur l'extérieur de la joue et frotter en faisant tourner la brosse d'avant en arrière pendant 15-30 sec. La présence d'un peu de sang sur la brossette n'est pas dramatique.
- **Assécher** la brossette en l'agitant à l'air pendant 10-20 sec et remettre le capuchon.
- Si vous prélevez plusieurs animaux, laver vos mains entre chaque individu. Placer les 2 brossettes de l'animal dans un enveloppe identifiée avec son nom.



 La présence de contaminants sur les brossettes est nuisible pour les réactions. Les brossettes souillées par des particules, comme la terre et la saleté, seront refusées pour les analyses sans possibilité de remboursement.

#### **ADRESSE**



 Placer les échantillons et une copie de la facture dans une enveloppe adressée à:

Isabelle Gilbert Pav. Comtois, Dép. Sciences animales 2425 rue de L'Agriculture, Local 4223 Université Laval Québec, QC, GIV 0A6